

CELLSPLODER

YÜZEY ENFEKSİYONLARINA DİJİTAL TEDAVİ



BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

- Deri/Yüzey enfeksiyonlarını etkili ve oldukça hızlı tedavi eder
- Montajı ve kullanımı basit
- Sivillceler, Akne, Ayak mantarı, Tırnak mantarı için etkin tedavi
- Kolay zamanlayıcı kullanımı, 30 ile 180 saniye
- Dijital Otomatik Enerji Düzeyi Ayarı
- Uzun ömürlü MagicWire Problar
- Ultra Yüksek Hızlı Mikroişlemci
- Full Dijital
- Basit Dokunmatik Tuşlar
- Geliştirilmiş Enerji Kontrolü için Bulanık Mantık
- Taşınabilir, Hafif sistem
- Ücretsiz Taşıma Çantası
- Rahat koşullarda tedavi uygulayabilme
- Bakım/Onarım maliyeti yok
- Az Enerji harcar
- Çok düşük çalışma maliyet/tedavi başına
- Düşük maliyetli elektrodlar

CE 1023

- Sadece eğitilmiş operatör tarafından kullanılmak üzere olan etkili bir makinedir.
- Sektörde basit, nazik ve asgari eğitim gerektiren bir makineye ihtiyaç vardı ve biz CellSploder'i yaptık.
- İsminden de anlaşılacağı üzere mikrop hücrelerini patlatır, infilak eder.
- CellSploder vücudun yüzeyine negatif iyonlar gönderir. CellSonic makinesinde olduğu gibi vücuda nüfuz etmez.
- CellSploder'i yüzeydeki mikropların neden olduğu ayak mantarı, diş çürükleri, Staflokok Aureus (SA) gibi hastalıkların tedavisinde kullanabilirsiniz.

Kullanımı : Uçları yavaşça hareket ettiriniz, cilde temas etmeyiniz, ucu ciltten 2mm ile 10mm uzaklıkta tutunuz ve cilde temas edecek şekilde gezdirmeyin. Mikrop ve bakterilerin patlamasına olanak/zaman vermek için ucu yavaşça hareket ettiriniz. Ucu ciltten yaklaşık 5mm uzak tutunuz. Sadece yavaşça hareket ettiriniz. Ucu tek pozisyonda tutmak sadece küçük bir bölgenin iyileşmesine neden olur. Eğer ucu uzağa götürürseniz tedavi durur ve kesikli bir vızıldama/sinyal sesi duyarsınız.

- Enfekte olmuş her ayak için 2 dakika harcayınız.
- Enfekte olmuş bir diş 2 dakika gerektirir.
- Enfekte olmuş tırnak en az 15 dakika ile 45 dakikaya kadar tedavi görmeli. Çünkü negatif iyon sinyallerinin tırnağın kalın yüzeyini geçerek yönlerini bulmaları gerekecek.
- Ülser tedavisinde her santimetrekare için bir dakika uygulama yapın.
- Tedavisi en zor olan siğil içinse haftada bir ve altı hafta süreyle uygulama gerekir.

Tedaviden sonra dezenfeksiyon kremleri uygulanabilir. İki tekniği bir arada kullanmak etkin tedaviye yardımcı olur. Tek başına bir teknik kullanmaktan daha avantajlıdır.

CellSploder'i kullanmadan önce bütün kremleri temizleyin ki, yüzeydeki krem, iyonların mikrop ve bakterilere nüfuz etmesine engel olmasın. Siğili öldürdükten sonra ölü deri hala orda kalabilir ve yeni deri ile değişimi biraz zaman alabilir.

Teknik Özellikler

Kontrol Ünitesi

Metod	Ultra Yüksek Hızlı İşlemci
Besleme Gerilimi	230 V \pm 10% AC @ 50-60 Hz
Güç	6 Watts (max)
Sigorta	500mA, 5X20mm, Hızı Şişme
EN60601-1 Sınıf	II
EN60601-1 Tipi	BF
Güç Girişi	IEC C14 inlet üç telli ayrılabilir kablo montaj.
Tedavi devir zamanlama	30 ile 180 saniye aralığında 30 saniyelik değişimler ile ayarlama (ön tuşlar ile programlanabilir)
Açık devre çıkışı	16kV DC nominal
Nominal Çıkış Akımı	100 μ A \pm 5%
Çalışma Sıcaklığı	15° - 35° C
Boyutlar	90 mm Y X 280 mm G X 240 mm D
Ağırlık	2 kG
Korunma Derecesi	IP20

El Parçası

Boyutlar	100mm L X 13mm \varnothing
Bağlantı	Sürekli konsola bağlı
Ağırlık	50 gr (yaklaşık)
Sterilizasyon metodu	MagicWire - Etilen Oksit, Formaldehit, Glutaraldehit 2% veya Formalin buharı ile steril edilebilir. El Parçası ise sadece Formalin buharı ile sterilize edilebilir.

Üretici :



Apex MediTech

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634



Kalitesi Onaylanmış

ISO 13485:2003
ISO 9001:2008